

【使用上の注意】

<装用上の注意>

- 装用中に痛みや、くもる・かすむ・ぼやけるなどの見え方の異常を感じたら、直ちにレンズをはずして眼科医に相談してください。その間レンズをはずして眼鏡を使用してください。
 - レンズ装用中は目をこすらないでください。(角膜を傷つけたり、レンズを破損することがあります。)
 - レンズを装用してテレビやコンピューターの画面を長時間見続けると、目が乾くことがあります。常に完全にまばたきをするように心がけてください。
 - レンズの乾燥の原因となりますので、空調や扇風機などの風に目を長時間当てないようにしてください。
 - 乾燥感が強い場合は、眼科医に相談して指示に従いソフトコンタクトレンズ用の目薬を使用してください。
 - レンズ装用中は眼科医から指示された目薬以外は、使用しないでください。
 - 洗剤や化学薬品などが目に入った場合は、直ちにレンズをはずして水道水で目を十分に洗ってから、レンズは装用せずに眼科医の診察を受けてください。
- <レンズ取り扱い上の注意>**
- レンズは薄くつくられていますので取り扱いには十分注意してください。万一、取り扱い中にレンズにキズがついたり破損した場合には、使用しないでください。
 - レンズを容器から取り出す際に確認し、万一、二枚以上重なっていた場合、そのレンズは使用しないでください。(二枚以上重なったレンズをそのまま使用すると、適正な視力が得られません。)
 - 化粧品、ローション、石けん、クリームなどが、レンズにつかないように注意してください。それらが付着したレンズは使用しないでください。
 - レンズは、保存液から出したままにすると乾燥しますのでご注意ください。また、一旦乾燥したレンズは使用しないでください。

<その他の注意>

- コンタクトレンズは目の状態や環境の変化などにより、装用できない場合があります。そのような場合のためにも、常に目にあった眼鏡を用意してください。
- レンズの破損や紛失など、万一の場合に備えてスペアのレンズを常に携帯してください。特に旅行の際は、忘れずに用意してください。長期間の渡航の場合は、必ず眼科医に相談のうえ、指示に従ってください。
- アレルギー疾患を有する場合は眼障害が発生する危険性が高まりますので、必ず医師・眼科医に相談のうえ、指示に従ってください。
- 水道水などには微生物が含まれている可能性もあり、それが原因で感染症などの眼障害を引き起こす危険性がありますのでご注意ください。
- 水泳の際はレンズをはずしてください。どうしても視力補正が必要な場合は、眼科医に相談してください。
- ヘアスプレーなどを使う場合は、目を閉じた状態で使用してください。
- 毒性あるいは刺激性の蒸気が存在する場所ではレンズを使用しないでください。
- ホコリの多い所でレンズを装用しないでください。どうしても装用が必要な場合は、眼科医と相談のうえ、ゴーグルなどを使いホコリが目に入らないようにしてください。
- レンズに目が慣れるまでは、車の運転や機械類の操作は行わないでください。
- 車の運転中や機械類の操作中にレンズがずれたり、はずれたり、または痛みなどで急に見えにくくなったときは、周囲の安全を確認して、速やかに運転や操作を中止してください。
- 高齢者・子供や障害のある方で、ご自身での取り扱いが困難な場合は、眼科医に相談のうえ指示に従ってください。
- 病気、妊娠・出産などによる体調の変化、薬剤の服用や点眼、または生活環境によっては、コンタクトレンズの装用に影響を及ぼす場合がありますので、必ず医師・眼科医に相談のうえ、指示に従ってください。
- 自分のレンズを他人に渡したり、他人のレンズを使用しないでください。
- 本品の加工や改造は行わないでください。

<装用にもなる症状と対処方法>

- 慣れるまで
レンズに慣れるまでは、下記のような症状が見られることがあります。個人差はありますが、慣れるに従って解消されます。このような症状が長く続いたり、症状が強い場合は無理せずに早めに眼科医の検査を受けてください。
・軽い異物感 ・軽い充血 ・視力不安定 ・涙が多く出る ・目のかゆみ
- 慣れてから
レンズに慣れてからも下記のような症状が見られることがあります。このような症状が、それぞれの対処方法で改善されない場合や、他の症状が見られた場合には、装用を中止して速やかに眼科医の検査を受けてください。

症状	考えられる主な原因	対処方法
異物感や痛み	1) レンズを裏返しに装着 2) レンズの乾燥 3) レンズの汚れ 4) レンズのキズや破損 5) ホコリなどの異物 6) 眼疾患	新しいレンズと交換してください。症状が改善しない場合は、装用を中止して、眼科医の検査を受けてください。特に6)と思われる場合は、速やかに眼科医の診察を受けてください。
目が充血する	1) 上記と同様 2) 長時間のレンズ装用 3) 花粉症などのアレルギー 4) ドライアイ 5) 睡眠不足、体調不良 6) 長時間の近方視	新しいレンズと交換してください。症状が改善しない場合は、装用を中止して、眼科医の検査を受けてください。眼疾患と思われる場合は、速やかに眼科医の診察を受けてください。症状が軽く、5) または6) の原因が考えられる場合は、装用を中止して様子を見てください。
目がかゆい	1) レンズの汚れ 2) 花粉症などのアレルギー	新しいレンズと交換してください。症状が改善しない場合は、装用を中止して、眼科医の検査を受けてください。

症状	考えられる主な原因	対処方法
目が乾く	1) ドライアイ 2) レンズの乾燥や汚れ 3) 空気の乾燥(冷暖房など) 4) 服薬(カゼ薬など) 5) 長時間に渡るディスプレイ画面の注視	眼科医に指示されたソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼するか、新しいレンズと交換してください。症状が改善しない場合は、眼科医に相談してください。
通常より目ヤニが多く出る	1) 眼疾患	直ちに装用を中止して、眼科医の診察を受けてください。
目が疲れる	1) 長時間の近方視 2) レンズの度が合っていない 3) レンズ左右を間違えた 4) 体調不良 5) 視機能の問題	レンズの左右を確認してください。症状が改善しない場合は、眼科医に相談してください。体調の問題が考えられるときは、装用を中止して様子を見てください。
目がかすむ(視力低下)	1) レンズの汚れ 2) レンズ左右を間違えた 3) 長時間の近方視 4) 度が変わった 5) 眼疾患 6) 体調不良 7) 体の病気(糖尿病など)	レンズの左右を確認してください。症状が改善しない場合は、眼科医に相談してください。眼疾患と思われる場合や急激に視力が低下した場合は、速やかに眼科医の診察を受けてください。
レンズがずれる、ずれぬ	1) レンズを裏返しに装着 2) レンズの乾燥 3) レンズが目に合わせていない	レンズの表裏を確認してください。正しく装用していた場合は、眼科医に相談してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<保管方法>

- 直射日光を避け、室温で保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

<使用期間>

- 本品は「1日交換終日装用ソフトコンタクトレンズ」です。

<使用期限>

- 使用期限(📅)は、箱(2次包装)側面とホイル(1次包装)上の面に表示してあります。(例: 2015/01=使用期限2015年1月末まで)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 1箱90枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー 東京都千代田区西神田3丁目5番2号* Tel: 0120-132-308
<製造元>	ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア インク社(米国) Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア(アイルランド)社 Johnson & Johnson Vision Care(Ireland)

【お問い合わせ先】

<症状に関するお問い合わせ>

コンタクトレンズ装用にもなる目の症状などについては、処方を受けた眼科医にご相談ください。

<製品に関するお問い合わせ>

製品の品質には万全を期しておりますが、万一レンズや包装容器に異常を発見した場合には使用せず、眼科医・購入先に相談してください。または、下記の弊社フリーダイヤルにお問い合わせください。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケア カンパニー カスタマーサービス
フリーダイヤル: 0120-132-308
オペレーター受付時間: 9:00~18:00(日祝除く)
ホームページアドレス: <http://acuvue.jnj.co.jp>
 ※パソコン・携帯電話でご利用いただけます。

包装に記載されているマークについて

マーク	解説	マーク	解説
	添付文書をお読みください		UV吸収剤を配合したコンタクトレンズ
	使用期限		レンズ表裏: 正常
	製造番号		高圧蒸気滅菌済
	直径		医家向医療機器
	ベースカーブ		容器包装識別表示: 紙
	頂点屈折力		容器包装識別表示: プラスチック
	原産国*		

改訂箇所について「*」は改訂箇所を示しています。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 ビジョンケア カンパニー 東京都千代田区西神田3丁目5番2号*
 ©登録商標 ©J&JKK2009